



Instrukcja stosowania preparatu
PROPANO AF
 do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Propano AF to gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji odpornych na działanie alkoholu powierzchni i sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Propano AF przeznaczony jest do dezynfekcji foteli zabiegowych, łóżek, blatów, parapetów, szyb, desek, klamek i innych trudnodostępnych powierzchni.

Preparat może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych. Propano AF nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni, nie podrażnia dróg oddechowych, nie wymaga wycierania, nie pozostawia śladów ani smug.

1

Powierzchnię i urządzenia spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia. Dezynfekcja sprzętu: całkowicie zanurzyć w preparacie Propano AF, obrócić w celu równomiernego zwilżenia powierzchni, wyjąć z wanny i pozostawić do wyschnięcia.

2

Czas dezynfekcji i spektrum działania:

Spektrum	Obciążenie		Czas działania
	bez	z obciążeniem	
Bakterie, grzyby	x	x	30 sekund
Tbc =M.terrae, MRSA	x	x	
HBV / HIV / HCV	x	x	30 sekund
Adenovirus	x	x	
Rotavirus	x	x	
Vacciniavirus	x	x	
Herpes	x	x	
SARS	x	x	
Grypa (włącznie z H1N1 i H5N1)	x	x	