



Instrukcja stosowania preparatu
ULTRADESMIT
 do dezynfekcji narzędzi

Ultradesmit to skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący do instrumentów medycznych oraz narzędzi i przyrządów kosmetycznych o właściwościach antykorozyjnych i wysokiej tolerancji materiałowej. Zalecany do dezynfekcji przedmiotów ze szkła, porcelany, metalu, gumy i materiałów syntetycznych, szczególnie zalecany do specjalistycznych przyrządów fryzjerskich i kosmetycznych takich jak: nożyczki, cążki, pęsety, szczotki, grzebienie itp. Brak aldehydów eliminuje odbarwienie dezynfekowanych materiałów. Odpowiedni do mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych.

1	Napełnić wannę do dezynfekcji narzędzi odpowiednią ilością zimnej wody (w zależności od wielkości wanny).		
2	W celu uzyskania właściwego stężenia roztworu dezynfekcyjnego należy odmierzyć odpowiednią ilość koncentratu na : - 30 ml koncentratu na 970 ml wody dla stężenia 3% - 50 ml koncentratu na 950 ml wody dla stężenia 5%		
3	Narzędzia całkowicie zanurzyć przestrzegając właściwego stężenia i czasu działania zgodnie z tabelą:		
	Spektrum	stężenie	czas dezynfekcji
	<i>B, Tbc=M.terrae, F, V (włącznie z HBV, HCV, HIV, H1N1, Adeno, Vaccinia), Spory</i>	3%	60 min
		5%	15 min
4	Po upływie określonego w tabeli czasu instrumenty wyjąć i dokładnie spłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Kanały endoskopu płukać do całkowitego usunięcia piany.		
5	Okres aktywności czystego roztworu roboczego wynosi 14 dni. W przypadku, gdy wcześniej był stosowany preparat aldehydowy należy starannie umyć wannę do dezynfekcji.		